



POWER スチーマー 1+2

スケール除去方法

注意

- ☑ 定期的に、または塩を使ったソフトニングシステムを使用している場合は週に一度、本体を水ですすいでください。
その際は、取扱説明書の指示を守ってください。
- ☑ Renfert社のスケール除去液「Renfert POWERスチーマー用スケール除去液」のみを使用してください(腐食防止効果を発揮)。
- ☑ クエン酸のような他のスケール除去液は、本体を損傷する可能性があります。
- ☑ 注意：スケール除去液は腐食性があります。
- ☑ スケール除去中は、保護メガネと保護手袋を着用してください！
- ☑ スケール除去作業中は、本機を運転しないでください。
- ☑ スケール除去中は、必ず注入口を開けておいてください。



Step-by-step

1. 本機を主電源から外し、冷まします。
2. 点検口を開けます。
3. 圧力タンクを水ですすぎ、ブラシで洗浄します。
4. 点検口を閉じてください。
5. 圧力タンクに1 Lの水を入れ、
Renfert POWERスチーマー用スケール除去液を1 L入れます。
6. 15分後にさらに0,6 - 0,8Lの水を加えます。
泡が出た場合は、泡がおさまってから注水を続けてください。
7. 汚れの程度が軽い場合は2~4時間、
汚れの程度が重い場合は8~14時間、スケール除去液を浸透させます。
8. 点検口を開け、スケール除去液を排出します。
9. 使用済みのスケール除去液は、
大量の水で希釈し流水と一緒に廃棄することができます。
10. 圧力タンクを水で数回すすぎ、ブラシで洗浄します。

詳細情報

取扱説明書、安全データシート、アプリケーションビデオなどの詳細情報は、当社ウェブサイトにてご覧いただけます。



[www.renfert.com/
power-steamer-1](http://www.renfert.com/power-steamer-1)



[www.renfert.com/
power-steamer-2](http://www.renfert.com/power-steamer-2)

