

Renfert

making work easy

NOVITÀ



Renfert-Scanspray classic

NOVITÀ Spray opacizzante nella confezione XL

NOVITA Renfert-Scanspray classic

Spray opacizzante nella confezione XL

Renfert-Scanspray classic* è uno spray opacizzante 3D a grana fine per la scansione extraorale di superfici lucide o molto riflettenti (ad esempio modelli, corone primarie, strutture) e convince per la sua alta resa ed economicità ed anche per la capiente confezione XL per gli utenti che ne fanno largo uso.

Vantaggi

- Grana molto fine e applicazione di strato sottile ed omogeneo per dettagliati risultati di scansione.
- Esatta rappresentazione dei bordi ed elevata opacità per la digitalizzazione ad alta precisione degli oggetti.
- Formato XL (500 ml) per un uso particolarmente conveniente.
- Senza TiO_2 - non contiene biossido di titanio.

Dettagli

- Nessuna formazione di grumi o di bolle (agglomerazione), per cui significativa riduzione degli errori dimensionali.
- Resa elevata grazie all'applicazione di uno strato microfine.
- La speciale valvola consente una finissima nebulizzazione per una precisa opacizzazione.
- L'adesione ottimale anche su superfici lucide (ceramica, metallo, ecc.) assicura una facile applicazione.
- Il breve tempo di asciugatura e la facile rimozione accrescono l'efficienza del flusso di lavoro.

Making work easy

Con Renfert-Scanspray classic si possono opacizzare i più diversi tipi di materiale, in modo che gli scanner 3D da laboratorio (anche quelli di tipologia meno recente) possano acquisire con precisione le caratteristiche rilevanti della superficie con le macro e microstrutture.




PREMIUM QUALITY
MADE IN GERMANY



Applicazione di uno strato omogeneo per dettagliati risultati di scansione


Come ottenere la miglior qualità

Applicazione: Per poter sfruttare al meglio le prestazioni e l'alta qualità del prodotto, è necessario osservare due punti:

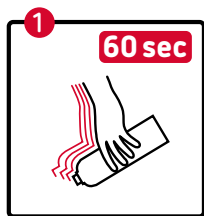

Agitare

Prima di ogni utilizzo, agitare vigorosamente la bomboletta a testa in giù per 60 secondi. La sfera integrata deve essere chiaramente udibile.

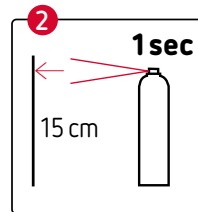

Applicazione

La distanza di spruzzatura dall'oggetto deve essere di 15 cm. Spruzzare in dosi di 1 secondo con un leggero movimento.

* Disponibile solo in mercati selezionati

Referenze

Renfert-Scanspray classic, 500 ml

No. 17311000